

U POST REMOVAL FORCEPS

Usefulメタルコア除去鉗子





U POST REMOVAL フォーセップス #ストレート
商品コード:18070
標準価格:25,000円
全長:170mm



U POST REMOVAL フォーセップス #カーブ
商品コード:18071
標準価格:25,000円
全長:170mm



←スリット

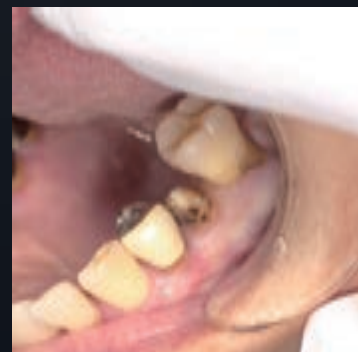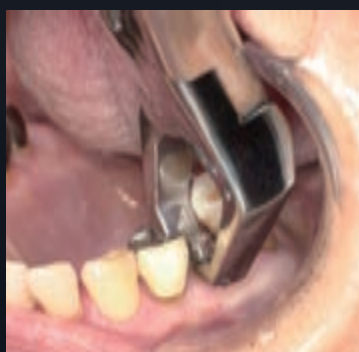

1. マージン部にスリットを入れる
2. 鉗子切端部の適合を確認
3. 軽く鉗子を握って、ポストが浮き上がるか確認。浮き上がらない時は、さらにスリットを深くするを繰り返す。
4. 歯根破折しないように真上に引き上げる。

ご注意ください

強い力で鉗子を把持すると歯根破折の可能性があります。
また、除去時に歯牙からポストが浮き上がらない時は、無理をせず切削して除去して下さい。

一般医療機器・歯科用起子及び剥離子 届出番号:0982X00010000388

