


## エレベーター（ステンレスハンドℓ）#Nタイプ

・新規に先端幅広タイプ（日大型）をラインナップ

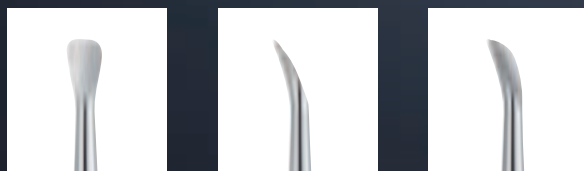

### エレベーター（ステンレスハンドℓ） #Nタイプ

CODE : 26100

標準価格：¥10,000

医療機器届出番号09B2X00010000798 一般医療機器・歯科用エレベータ

～写真提供～ 藤澤将人先生（目白ヶ丘デンタルクリニック・矯正歯科）



歯根膜への挿入は、歯根を破折しないように近心や遠心から行います。


先端を少しずつ回転させて歯根膜を広げて、歯根の湾曲を意識しながら湾曲方向に力がかかるようにして脱臼させます。

幅が広い扇形状で接触面積も広く、テコの力が伝わりやすいので、骨への負担が少なく抜歯することができます。

●幅が広い扇形状の先端部が特長のエレベーター

●先端：4.5mm

●歯根膜への挿入がスムーズに行えるように先端部がより薄くなっています（※弊社従来品比較）

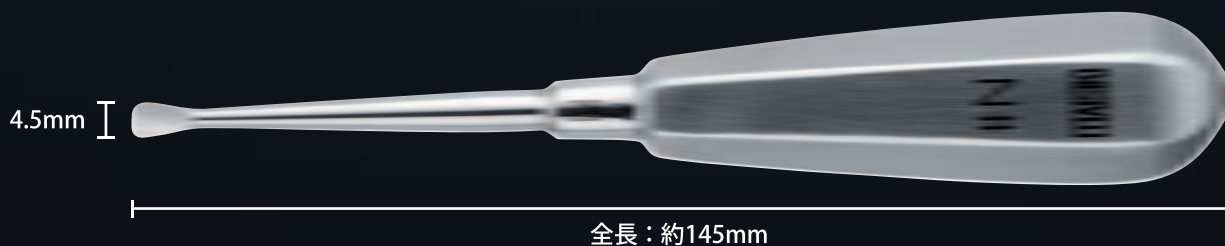

※表示価格に消費税は含まれておりません。  
※予告なく仕様・価格を変更する場合がございます。  
※商品写真は印刷の関係上、色彩が実物と異なる場合があります。

