

使用済み器具類

すぐに洗浄できる場合

すぐに洗浄できない場合

※器具・器材の汚れ具合によって洗浄方法を選択してください。
使用後は直ちに洗浄することをおすすめいたします。

超音波洗浄

浸漬 10分～
水2ℓに付属スプーン1杯
400倍希釈

浸漬洗浄

浸漬 10分～
水1ℓに付属スプーン1杯
200倍希釈

※洗浄液は、一日一回の
頻度で交換してください。

※汚れ具合によって、洗浄
時間を調整してください。

スプレーする

500ml ボトルに
付属スプーン1杯

血液などタンパク質汚れの
乾燥・凝固を防ぎます

流水すすぎ 水分除去

※十分なすすぎと水分除去を行ってください。
洗浄後に水分が残留したまま放置をすると
錆等の原因となります。

滅菌・消毒

オートクレーブ滅菌・EOG滅菌・薬液消毒など

乾燥・保管

その他

希釈液に浸す

スピットン・バキューム

バキューム・スピットンに希釈液約300ccを吸引させ、
一晩放置する。その後十分に水を吸引させて洗い流す。

白衣・院内着

血液などが付着した部分に希釈液を塗布し、水洗後に洗濯する。

義歯・リテーナー

希釈液に浸して、必要に応じて超音波洗浄を行う。

～汚染血液による除タンパク効果試験結果～

（公的第三者機関による）



浸漬洗浄 10分 (200倍希釈液) … **98.3%除去**
超音波洗浄 10分 (400倍希釈液) … **99.1%除去**

※ミラートップは超音波洗浄を行わないでください

～24時間浸漬 腐食試験結果～

（公的第三者機関による）



スチールバー、ミラー、ステンレス
バキューム、合成樹脂、シリコン、プラスチック

→ **24時間浸漬で
変化なし**

＜お問い合わせ＞



歯科用インスツルメント
株式会社 **タスク**

〒112-0001

東京都文京区白山 2-38-14 白山 CT ビル 5F
TEL: 03-5615-8827 FAX: 03-5615-8837

新製品のご紹介、
カタログのダウンロード、
お得なセールの情報などは、
ホームページで！

